

NEU

SENSODYNE® RAPID – schnelle Linderung & lang anhaltender Schutz



SENSODYNE®
ZUR LINDERUNG VON SCHMERZEMPFINDLICHKEIT · KLINISCH BELEGT


WAS SIND SCHMERZ- EMPFINDLICHE ZÄHNE ?

Reagieren Ihre Zähne schmerzhaft auf Kaltes, Heißes, Süßes, Saures oder Berührung?

Dann haben Sie schmerzempfindliche Zähne. Schmerzempfindlichkeit entsteht, wenn Zahnhälse mit ihren winzig kleinen Kanälchen schutzlos frei liegen. So können Reize an den Zahnerv vordringen und hier zu einem stechenden Schmerz führen.

Wie entstehen schmerzempfindliche Zähne?

- Übermäßiges und/ oder falsches Zähneputzen sowie Zahnfleischerkrankungen können zu einem Zahnfleischrückgang führen. So kann es zu frei liegenden, empfindlichen Zahnhälßen kommen.
- Säurehaltige Lebensmittel können für Zahnschmelz-Abbau am Zahnhals verantwortlich sein. Auch so kann es zu frei liegenden Zahnhälßen kommen.

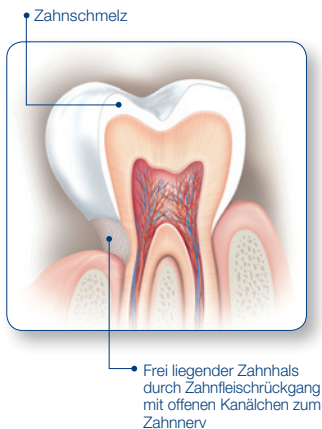


WIE WIRKT SENSODYNE® RAPID ?




SENSODYNE® RAPID Zahncreme verschließt die offenen Kanälchen und bildet eine Schutzschicht gegen die Weiterleitung schmerzhafter Reize zum Nerv. So wird der Zahn vor Schmerzempfindlichkeit geschützt.



1. Frei liegender Zahnhals

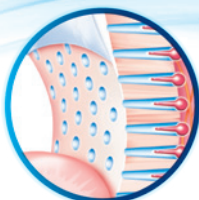

2. Mikroskopisch kleine Kanälchen, die zum Nerv führen

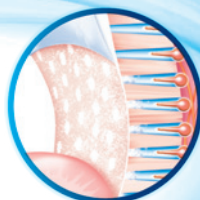

3. SENSODYNE® RAPID verschließt die offenen Kanälchen und bildet eine Schutzschicht gegen Schmerzempfindlichkeit

WIE WIRD SENSODYNE® RAPID ANGEWENDET?



Schnelle Linderung von Schmerzempfindlichkeit:

Spüren Sie eine schnelle Linderung, indem Sie eine erbsengroße Menge der Zahncreme auf Ihre Fingerspitze geben und diese direkt am schmerzempfindlichen Zahn 1 Minute sanft einmassieren.



Lang anhaltender Schutz:

Durch zweimal tägliches Anwenden von SENSODYNE® RAPID mit der Zahnbürste erzielen Sie einen lang anhaltenden Schutz vor Schmerzempfindlichkeit.

SENSODYNE® RAPID



- Schnelle Linderung von Schmerzempfindlichkeit
- Lang anhaltender Schutz
- Mit Fluorid

SENSODYNE® RAPID

SENSODYNE® RAPID –

schnelle Linderung & lang anhaltender Schutz



ANWENDUNG:

Spüren Sie eine schnelle Linderung, indem Sie eine erbsengroße Menge der Zahncreme auf Ihre Fingerspitze geben und diese direkt am schmerzempfindlichen Zahn 1 Minute sanft einmassieren.

Durch zweimal tägliches Anwenden von SENSODYNE® RAPID mit der Zahnbürste erzielen Sie einen **lang anhaltenden Schutz** vor Schmerzempfindlichkeit.

WICHTIG:

Nur zur oralen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet, sofern keine Anleitung durch einen Zahnarzt oder durch medizinisches Fachpersonal erfolgt. Schmerzempfindliche Zähne können auf ein grundlegendes Problem hindeuten, das der Betreuung durch einen Zahnarzt bedarf.



Falls die Symptome andauern, lassen Sie sich von einem Zahnarzt beraten.

Die direkte Anwendung mit dem Finger am Zahn sollte nicht häufiger als 2x täglich erfolgen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

 **SmithKline Beecham Ltd,**
EUCH CQ, Slough, SL1 3NW, U.K.

 0120 

 Verwendbar bis:
siehe Seitenlasche der Verpackung
 **LOT** siehe Seitenlasche der Verpackung

Vertrieb: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl
GlaxoSmithKline Markenartikel GmbH, A-6020 Innsbruck

SENSODYNE® ist eine eingetragene Marke der GlaxoSmithKline Unternehmensgruppe.

INGREDIENTS:

Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Strontium Acetate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Sodium Propylparaben, Sodium Methylparaben, Limonene.

Enthält Natriumfluorid. Fluoridgehalt 1040 ppm.