



GELASPON® STRIP

BAUSCH+LOMB

Zur Blutstillung und Wundversorgung

Gelaspon® Strip ist ein steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm zur Versorgung von kleinen oberflächlichen Wunden. Er hat ein hohes Saugvermögen für Blut und Wundsekrete. Gelaspon hat einen neutralen pH-Wert und ist gut gewebeverträglich.

Gelaspon® Strips in der Abmessung 4x1x1 cm sind einzeln steril verpackt und lassen sich rückstandslos und schmerzfrei von oberflächlichen Wunden entfernen.

Hohes Saugvermögen

Gelaspon® Strips aus 100% Schweinegelatine unterstützen mit ihrer feinporigen Struktur die Blutgerinnung. Sie haben ein hohes Saugvermögen für Blut und Wundsekrete. Als Wundauflage lösen sich die Strips in zwei bis drei Tagen auf.

Gelaspon® Strips können zur Blutstillung bei leichtem bis mittelschwerem Nasenbluten, zur Versorgung oberflächlicher Wunden und nach dem Ziehen eines Zahns verwendet werden.

Steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm

- Feinporige Struktur unterstützen die Blutgerinnung
- Gut gewebeverträglich
- PH-neutral
- Einzeln steril verpackt im praktischen Fünfer-Pack



ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Gelaspon® Strips können trocken und feucht angewendet werden
- Mit einer sterilen Schere können Gelaspon® Strips auf Größe und Form der Wunde zugeschnitten werden
- **Blutstillung bei Nasenbluten:** 1 Streifen Gelaspon® Strip in das betroffene Nasenloch einführen. Dabei kann der Gelaspon® Strip zum besseren Einführen leicht zusammengedrückt werden
- Sollte es bei Nasenbluten auch nach Verwendung eines zweiten Streifens Gelaspon® Strip nicht zum Stillstand der Blutung kommen, ist ein Arzt aufzusuchen
- **Versorgung von Wunden:** Bei trockenen Wunden empfiehlt es sich, Gelaspon® Strip angefeuchtet, zur Versorgung feuchter Wunden trocken zu verwenden
- **Blutstillung:** Gelaspon® Strip bis zum Stillstand der Blutung auflegen
- Bei sekret-absondernden Wunden bildet Gelaspon® Strip ein Gel, wodurch ein schmerzloser Verbandwechsel ermöglicht wird
- Gelaspon® Strip sofort nach Öffnen der Einzelverpackung verwenden, um die Sterilität zu gewährleisten



BEI NASENBLUTEN

Stöße und Stürze beim Spielen, starke körperliche Belastungen und trockene Heizungsluft können bei Kindern und Erwachsenen Nasenbluten verursachen. Gelaspon® Strips können wie eine sterile Tamponade verwendet werden und können das Nasenbluten innerhalb weniger Minuten stoppen.



VERSORGUNG VON WUNDEN

Beim Sport und im Haushalt sind kleine Schnitt- und Schürfwunden schnell passiert. Nach Reinigung der Wunden können Gelaspon® Strips schnell die Blutung stoppen; Strip einfach auf die Wunde auflegen und für einen besseren Halt ggfs. mit einem Pflaster fixieren.



NACH ZAHNEXTRAKTIONEN

Gelaspon® Strips sind hilfreich bei der Nachbehandlung und unterstützen eine schnelle Wundheilung nach Entfernen eines Zahnes. Die sterilen Gelaspon® Strips können auf die Größe der Wunde angepasst werden und lassen sich rückstandslos und schmerzfrei austauschen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie sind die Gelaspon® Strips aufzubewahren?

Die Gelaspon® Strips nicht über 25 °C und trocken aufbewahren. Ein Gelaspon® Strip sollte nach Öffnen des jeweiligen Einzelblisters sofort aufgebraucht werden.

Sind die Gelaspon® Strips für Vegetarier und Veganer geeignet?

Nein. Die Gelaspon® Strips bestehen zu 100% aus Schweinegelatine und sind damit nicht für Vegetarier und Veganer geeignet.

Wie groß ist ein einzelner Gelaspon® Strip?

Ein Gelaspon® Strip hat eine Größe von 4 x 1 x 1 cm. Eine Packung enthält 5 einfach steril verpackte Strips.

Hersteller: Aegis Lifesciences, 215 Mahagujarat Industrial Estate – 382213, Ahmedabad, Gujarat, Indien **Vertreiber:** Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin-Germany